



DIOPTRICKÉ OKULIARE NA ČÍTANIE

Vyrobcia: Max Eyewear Limited, 71 Lydden Grove, Londýn, Spojené kráľovstvo
Výhľadná distribúcia pre ČR a SR: Jan Nacházel - Optipartner EU, Obrataň 54, 394 12
Tel.: +420 737 065 527, e-mail: info@optipartner.eu
www.optipartner.eu

Výrobok je v súlade s európskou smernicou (EU) 2017/745.

Odporúčania na používanie a údržbu:

- Dioptrické okuliare na čítanie sú určené len na čítanie a na krátku vzdialenosť, nie na korekciu zraku, a preto nenahradzajú korekčné šošovky predpísané lekárom.
- Dioptrie v pravej a ľavej šošovke majú rovnakú silu, čo znamená, že ľudom s rôznym počtom dioptrií na pravom a ľavom oku nemusia úplne vyhovovať.
- Výrobok nie je určený na celodenné nosenie.
- Tieto okuliare by sa v žiadnom prípade nemali používať pri riadení motorového vozidla.
- Nie sú to ochranné okuliare na prácu.
- Šošovky chráňte pred poškribaním. Ak okuliare nenosíte na nose, vždy ich uchovávajte v pevnom puzdre.
- Na čistenie okuliarov na čítanie používajte čistú vodu a mydlový roztok alebo špeciálne roztoky na tento účel. Na ich vysušenie používajte utierky z mikrovlnáka. Použitie iných prostriedkov môže poškodiť šošovky alebo povrchovú úpravu okuliarov.
- Okuliare nevystavujte nadmerným teplotám.